

PraenaRhD

Nicht invasiver pränataler Test zur
Bestimmung des fetalen Rhesusfaktors D

Verpackungsanleitung

Inhalt

Blutentnahmeröhrchen und Verpackungsmaterial zur Anwendung
des PraenaRhD für eine Patientin:




1 EDTA Blutentnahmeröhrchen

Verwenden Sie kein Blutentnahmeröhrchen, bei dem das Verfallsdatum überschritten ist.



4 Barcode-Aufkleber

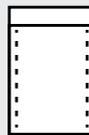


1 absorbierende Halterung



1 flüssigkeitsdichter
Schutzbeutel



1 Kühlpad
(im Kühlschrank lagern; nicht einfrieren)

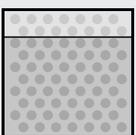

1 alubeschichtete
Isoliertasche



1 Rücksendebox für
Blutprobe und Dokumente

Wie wird das befüllte Blutentnahmeröhrchen verpackt und versendet?

1



Nachdem Sie das Blut gemäß der Gebrauchsanweisung entnommen haben, achten Sie bitte darauf, dass das befüllte Blutentnahmeröhrchen mindestens 3 Mal invertiert wird, um das Blut mit dem Reagenz zu vermischen.




Inadäquates oder verzögertes Mischen kann zu falschen Analyseergebnissen bzw. schlechter Produktleistung führen.

Für die Blutentnahme verwenden Sie bitte S-Monovette® EDTA.



Verwenden Sie keine Blutentnahmeröhrchen, bei denen das Verfallsdatum überschritten ist.

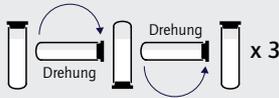


2



Kleben Sie einen Barcode auf das Blutentnahmeröhrchen. Der Barcode muss gut sichtbar sein, da der Auftrag ansonsten nicht bearbeitet werden kann.

3

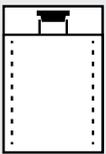


Schieben Sie das Blutentnahmeröhrchen in die Lasche der absorbierenden Halterung.

4



Legen Sie die absorbierende Halterung mit dem Blutentnahmeröhrchen in den flüssigkeitsdichten Schutzbeutel. Verschließen Sie den Schutzbeutel gemäß dem aufgedruckten Verwendungshinweis.

5

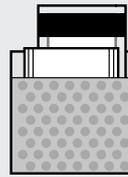

Verpacken Sie die Blutprobe zusammen mit dem Kühlpad in die alubeschichtete Isoliertasche.

6



Füllen Sie das Anforderungsformular aus (erhalten Sie separat). Kleben Sie einen Barcode auf das Original.

Bei Abrechnung über die gesetzliche Krankenversicherung fügen Sie einen ausgefüllten Laborüberweisungsschein Muster 10 bei.

7



Legen Sie die verpackte Blutprobe mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Original des Anforderungsformulars in die Rücksendebox.

8



Die gepackte Rücksendebox lagern Sie bis zum Versand im Kühlschrank bei 4–8°C.



Lagerungsstabilität des Blutes:

5 Tage ab Datum der Blutentnahme



Transportzeit:

24 h per Overnight Express

Was ist sonst noch wichtig?

Die Blutentnahmeröhrchen sind CE-markiert.

Die vollständigen Gebrauchsanleitungen finden Sie im Downloadcenter unter:

www.praenaforyou.com